

Протокол проводки на изопропиловом спирте

Пример проводки на изопропанол ГИСТОТЕХ

Станция	Реагент	Экспозиция
1	Фиксация	24-36 часов
2	Изопропанол ГИСТОТЕХ	90 мин.
3	Изопропанол ГИСТОТЕХ	90 мин.
4	Изопропанол ГИСТОТЕХ	120 мин.
5	Изопропанол ГИСТОТЕХ	60 мин.
6	Изопропанол ГИСТОТЕХ	120 мин.
7	Изопропанол ГИСТОТЕХ	120 мин.
10	Парафиновая среда для заливки и проводки ГИСТОТЕХ	60 мин.
11	Парафиновая среда для заливки и проводки ГИСТОТЕХ	60 мин.
12	Парафиновая среда для заливки и проводки ГИСТОТЕХ	120 мин.
12	Парафиновая среда для заливки и проводки ГИСТОТЕХ	120 мин.
Итого		40 час.00 мин.

Увеличение времени пребывания в спиртах выше указанного не улучшает и не ухудшает качества препаратов. Критично время пребывания в парафине - его уменьшение существенно ухудшает пропитывание кусочков и середина вываливается. Это время при возможности можно увеличивать. При замене спиртов - на 1 шаг назад. Одновременно заменяется 50% изопропанол (смесь с водой готовится из чистого спирта!). Менять - по мере загрязнения. Но после проводки более 300 кусочков - обязательно.

В качестве парафин рекомендуется ПАРАФИНОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ЗАЛИВКИ И ПРОВОДКИ ГИСТОТЕХ.